



Gebruik Anapen® trainer

de trainer bezit geen naald of injectiespuit

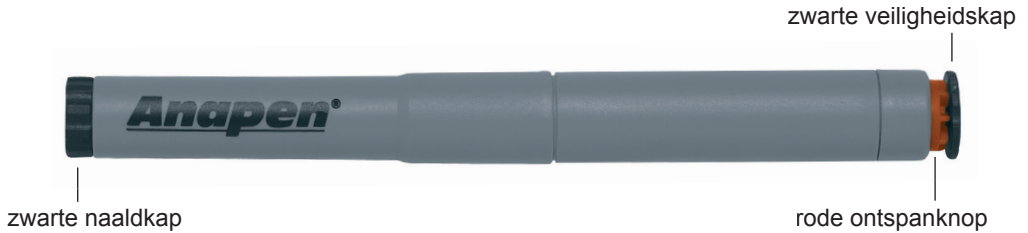


1

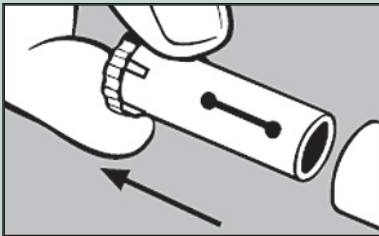


Verwijder de zwarte naaldkap.

2

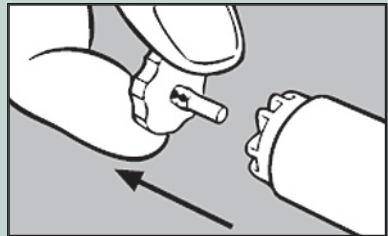


Verwijder de zwarte veiligheidskap van de rode ontspanknop.

3

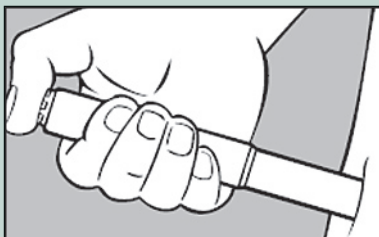

Drup de Anapen® stevig tegen de buitenkant van de dij en druk op de rode ontspanknop.


4

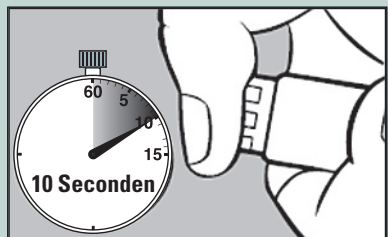


Houdt de Anapen® in positie en ingedrukt gedurende 10 seconden.

Gereed maken Anapen® trainer

de trainer bezit geen naald of injectiespuit

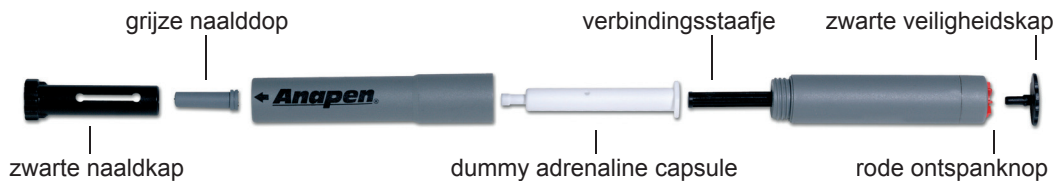


1

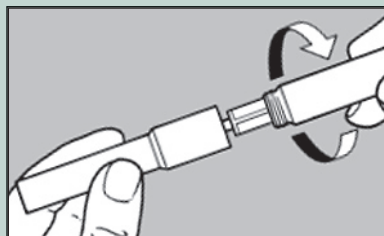


Draai het omhulsel van de Anapen® los.

2

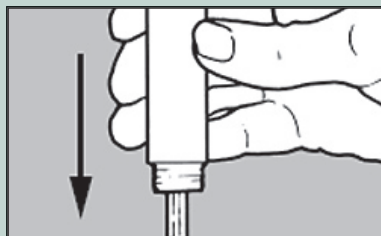


Duw het verbindingsstaafje terug in het grijze omhulsel tot aan de klik. Draai beide delen Anapen® in elkaar.

3

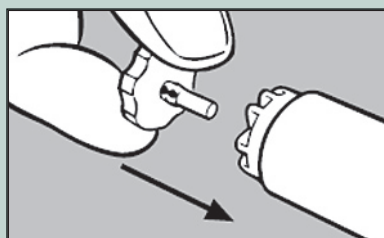

Plaats de zwarte veiligheidskap terug op de rode ontspanknop.

4

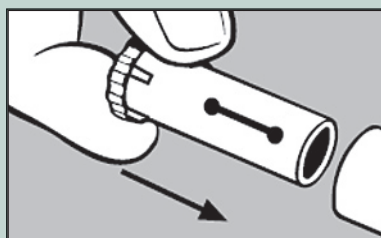

Plaats de zwarte naaldkap en het grijze naalddopje terug. De naaldkap inclusief het naalddopje zijn goed geplaatst indien de naaldkap automatisch terugveert wanneer licht aan de naaldkap wordt getrokken.